

Ce produit ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR)

FICHE TECHNIQUE MASQUE DE CONFINEMENT

Dans le contexte de crise sanitaire majeure associée à une pénurie de masques, nos masques proposés sont une alternative à l'absence de masques ou à un masque confectionné par soi-même. Nos masques ne prétendent pas se substituer aux masques normalisés.

Composition : 51% Polyester, 48% Coton, 1% Élasthanne.

Masque fait d'un tissu multicouche lavable composé de :

- 2 couches de polyester/coton,
- 1 couche molletonnée de polyester texturé « gonflant »,
- 1 bande élastique de chaque côté du masque,
- 1 poche supérieure pour accueillir une tige métallique (non fournie) pour un maintien sur le nez optimal. Un trombone déplié peut facilement s'insérer dans le haut du masque puis être déformé afin que le masque épouse la forme du nez et soit maintenu plaqué contre le visage.




Poids tissu : 260 g/m² ; dimensions : environ 21 x 12 cm ; épaisseur : 6 mm

Conditions d'utilisation et d'entretien :



- Laver à 60°C, cycle court (entre 45 et 60 min), essorage fort (entre 1200 et 1400 tr/min), avec détergent classique avant la première utilisation et après chaque utilisation (dès qu'il est retiré ou bien au bout de 8h d'utilisation continues maximum).
- Laisser sécher à l'air, à plat ou suspendu (pas de sèche-linge).
- Repassage rapide à la vapeur (110°C max) pour éliminer les plis et rétracter les élastiques.
- Se laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque.
- Attention à ne pas altérer ou modifier le masque lors de sa découpe et son usage.

Durée de vie prévue du masque : 10 lavages = 10 utilisations.

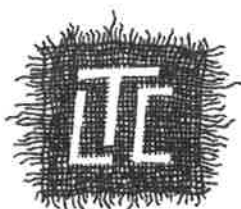

LES TISSAGES DE CHARLIEU

34, Rue Dorian 42190 CHARLIEU -Tél.04 77 60 00 44 -Fax. 04 77 60 32 96
www.ltc-jacquard.com - email : info@ltc-jacquard.com - creation@ltc-jacquard.com